

TIẾNG VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM TORCH: RQ9152C

XÁC NHẬN VỀ NHỮNG ĐẶC TÍNH MẪU VÀ NGÀY NHẬN

Xin vui lòng xác nhận rằng bạn đã nhận đúng và đầy đủ số lượng mẫu, những mẫu đó được mô tả như phần “ĐẶC TÍNH” dưới đây. Xin vui lòng xác nhận không có lọ mẫu nào bị vỡ hoặc hư hỏng và thông báo ngay cho đại diện của hãng Randox tại địa phương của bạn nếu có sai lệch. Sau cùng, xin vui lòng đăng nhập vào www.riqas.net để xác nhận thời gian chính xác mà bạn đã nhận bộ mẫu này.

ĐẶC ĐIỂM:

20 mẫu phân tích mỗi chu kỳ ngoại kiểm được cung cấp 3 tháng một lần, mỗi lần 5 mẫu phân tích. Hộp chứa 5 lọ mẫu lỏng (5 x 1 ml). Hộp này chứa mẫu số 1 - 5. Mỗi lọ được đánh số theo thứ tự phân tích mẫu.

CHUẨN BỊ VÀ PHÂN TÍCH MẪU

Đảm bảo độ đồng nhất của mẫu bằng cách xoay vòng nhẹ, không được lắc lọ chứa mẫu. Ly tâm mẫu trước khi phân tích trong vòng 1 phút tại 5000 vòng/phút. Để tránh sự bay hơi, đóng nắp lọ ngay sau khi sử dụng và bảo quản ở +2 to +8°C. Tất cả các mẫu phải được chạy cùng lúc và kết quả phân tích được gửi về cho RIQAS theo ngày khuyến cáo dưới đây. Mẫu nên được xử lý và phân tích giống như mẫu bệnh phẩm. Mẫu nên được phân tích trong vòng 2 ngày sau khi mở nắp.

ĐỘ AN TOÀN

Lưu ý: Mẫu có nguồn gốc sinh học và có khả năng độc hại, lây nhiễm sinh học.

Mẫu có nguồn gốc từ người và đều được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-2, HCV, HbsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận.

Tuy nhiên để bảo đảm an toàn tuyệt đối mẫu này nên được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm.

Chỉ sử dụng cho phân tích trong ống nghiệm.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Kết quả phân tích phải được gửi đến cho RIQAS trước 17:00 GMT ngày hạn chót gửi trả kết quả. Phòng xét nghiệm nên phân tích mẫu sớm trước ngày khuyến cáo phân tích mẫu nếu cần để đảm bảo thời gian gửi trả kết quả. Nếu trả kết quả bằng Fax, xin vui lòng gửi kết quả 3 ngày trước hạn cuối trả kết quả. Kết quả phân tích trễ sẽ không được chấp nhận sau hạn chót gửi trả kết quả của mẫu tiếp theo.

October 2018