

TIẾNG VIỆT

## CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM SYPHILIS: RQ9154

### XÁC NHẬN VỀ NHỮNG ĐẶC TÍNH MẪU VÀ NGÀY NHẬN

Xin vui lòng xác nhận rằng bạn đã nhận đúng và đầy đủ số lượng mẫu, những mẫu đó được mô tả như phần "ĐẶC TÍNH" dưới đây. Xin vui lòng xác nhận không có lọ mẫu nào bị vỡ hoặc hư hỏng và thông báo ngay cho đại diện của hãng Randox tại địa phương của bạn nếu có sai lệch. Sau cùng, xin vui lòng đăng nhập vào [www.riqas.net](http://www.riqas.net) để xác nhận thời gian chính xác mà bạn đã nhận bộ mẫu này.

### ĐẶC ĐIỂM:

12 mẫu phân tích mỗi chu kỳ ngoại kiểm được cung cấp 3 tháng một lần, mỗi lần 3 mẫu phân tích. Hộp chứa 3 lọ mẫu lỏng (3 x 1 ml). Hộp này chứa mẫu số 1 - 3. Mỗi lọ được đánh số theo thứ tự phân tích mẫu.

### CHUẨN BỊ MẪU VÀ PHÂN TÍCH.

Mẫu được cung cấp dạng lỏng, sử dụng liền. Để tránh bay hơi, đóng nắp mẫu ngay lập tức sau khi phân tích và bảo quản ở 2-8°C. Đảm bảo đồng nhất mẫu bằng cách trộn đều nhẹ nhàng. Không được lắc mạnh mẫu. Các mẫu phải được phân tích cùng lúc và gửi trả kết quả về cho RIQAS theo ngày gửi trả kết quả bên dưới. Mẫu được xử lý và phân tích hoàn toàn giống như mẫu bệnh nhân. Vui lòng phân tích mẫu trong vòng 2 ngày sau khi mở nắp.

### ĐỘ AN TOÀN

Lưu ý: Mẫu có nguồn gốc sinh học và có khả năng độc hại, lây nhiễm sinh học.

Mẫu có nguồn gốc từ người và đều được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-2, HCV, HbsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận.

Tuy nhiên để bảo đảm an toàn tuyệt đối nên mẫu này nên được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm.

Chỉ sử dụng cho phân tích trong ống nghiệm.

### LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Kết quả phân tích phải được gửi đến cho RIQAS trước 17:00 GMT ngày hạn chót gửi trả kết quả. Phòng xét nghiệm nên phân tích mẫu sớm trước ngày khuyến cáo phân tích mẫu nếu cần để đảm bảo thời gian gửi trả kết quả. Nếu trả kết quả bằng Fax, xin vui lòng gửi kết quả 3 ngày trước hạn cuối trả kết quả. Kết quả phân tích trễ sẽ không được chấp nhận sau hạn chót gửi trả kết quả của mẫu tiếp theo.

October 2018