



WUZHOU

BLOOD COLLECTION NEEDLE HOLDER

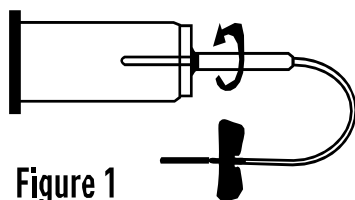


Figure 1

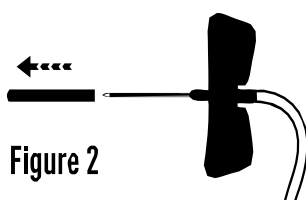


Figure 2

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP CHUNG

1. Bóc lớp bao bì ra .
2. Luồn vào giá đỡ . [Hình 1]
3. Chuẩn bị vị trí lấy máu tĩnh mạch bằng thuốc sát trùng.
4. Tháo bỏ ống bảo vệ [Hình 2] và thực hiện chọc tĩnh mạch .
5. Thu thập mẫu vào ống nghiệm .

THẬN TRỌNG

Giá đỡ này chỉ dùng một lần. Sử dụng một lần và bỏ đi. Việc sử dụng nhiều lần giá đỡ có thể làm hỏng sợi chỉ và khiến kim tuột chỉ hoặc quay ra ngoài. Vui lòng xử lý tất cả các mẫu sinh học và kim lấy máu theo đúng chính sách và quy trình của cơ sở của bạn. Trong trường hợp tiếp xúc với bất kỳ mẫu sinh học nào (ví dụ, thông qua vết thương đâm thủng), hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế thích hợp. Các mẫu có thể lây truyền viêm gan siêu vi, HIV (AIDS) hoặc các bệnh truyền nhiễm khác

Tên nhà sản xuất : Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer Co.,Ltd .

Địa chỉ : Số 2, Đường Guanyin, Khu phát triển kinh tế, Thái Hồ, Tỉnh An Huy, Trung Quốc .

Zipcode : 246400

Ngày cấp: 2024.01.05

Phiên bản số.: HYWZ- HLD - 01- A