

Figure 1

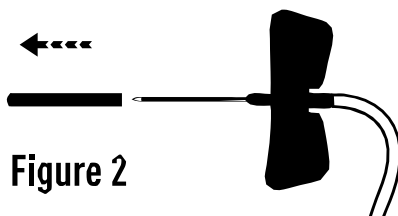


Figure 2

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP CHUNG

1. Bóc lớp bao bì ra .
2. Luồn vào giá đỡ . [Hình 1]
3. Chuẩn bị vị trí lấy máu tĩnh mạch bằng thuốc sát trùng .
4. Tháo bỏ ống bảo vệ [Hình 2] và thực hiện chọc tĩnh mạch .
5. Thu thập mẫu vào ống nghiệm .

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LƯU Ý: Phải đeo găng tay khi lấy máu tĩnh mạch

1. Luồn kim vào giá đỡ ống và đảm bảo giá đỡ ống được gắn chặt vào ống kim bướm .
2. Chuẩn bị vị trí lấy máu tĩnh mạch bằng thuốc sát trùng thích hợp.
3. Đặt cánh tay của bệnh nhân hướng xuống dưới.
Nắm chặt kim an toàn bằng hai ngón tay và nhẹ nhàng trượt nó dọc theo ống. Đưa nó càng gần con bướm càng tốt, đảm bảo rằng phần dài hơn của kim an toàn là phần áp vào cánh tay của bệnh nhân.
Tháo bỏ lớp vỏ bảo vệ của kim bướm và đưa vào tĩnh mạch. Lấy mẫu máu.
4. Rút kim ra khỏi tĩnh mạch.
5. Dán băng dính nhỏ ngay lập tức.
6. Vứt bỏ mọi thứ vào thùng đựng vật sắc nhọn phù hợp.

CẢNH BÁO

1. Sử dụng một lần , dụng cụ vô trùng , không gây sốt . Không tái sử dụng.
Không khử trùng lại. Các yếu tố rủi ro đối với cả bệnh nhân và người dùng đều tồn tại nếu thiết bị được tái sử dụng, bao gồm nhiễm bẩn và nhiễm trùng và thiết bị không hoạt động theo đúng chỉ dẫn sử dụng.
2. Cần thận không để kim đâm vào người, bệnh nhân hoặc môi trường xung quanh sau khi rút kim ra khỏi bệnh nhân. Chấn thương do kim tiêm có thể gây ra bệnh truyền

nhiễm do vi khuẩn lây truyền qua đường máu.

3. Kim lấy máu này sau khi sử dụng phải được xử lý như chất thải y tế. Vứt bỏ tất cả các vật liệu đã sử dụng như vật sắc nhọn vào một hộp đựng vật sắc nhọn phù hợp hoặc theo quy định của cơ sở.

THẬN TRỌNG

Một cây kim được lấy ra khỏi tĩnh mạch, không được cố gắng lắp lại ống bảo vệ trên kim. Máu có thể nhỏ giọt từ kim.

Giải thích ký mã hiệu:



Khử trùng bằng Ethylene Oxide



Tránh xa ánh sáng mặt trời



Chỉ sử dụng 1 lần



KHông được làm bằng mũ cao su tự nhiên



Thận trọng, tham khảo tài liệu đính kèm



Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng



Sử dụng bởi



Số lô

Tên nhà sản xuất : Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer Co.,Ltd .

Địa chỉ : Số 2, Đường Guanyin, Khu phát triển kinh tế, Thái Hồ, Tỉnh An Huy, Trung Quốc .

Zipcode : 246400

Ngày cấp: 2024.01.05

Phiên bản số.: HYWZ- BCS - 01- A